

補聴器・人工内耳チェック 記録シート

組 _____ 20 年 _____ 月 _____

なまえ		日 (月)			日 (火)			日 (水)			日 (木)			日 (金)		
		電池 (でんち)	本体、 イヤモー ルド	耳 (みみ)												
	右 (みぎ)															
	左 (ひだり)															
	右 (みぎ)															
	左 (ひだり)															
	右 (みぎ)															
	左 (ひだり)															
	右 (みぎ)															
	左 (ひだり)															
	右 (みぎ)															
	左 (ひだり)															
	右 (みぎ)															
	左 (ひだり)															
	右 (みぎ)															
	左 (ひだり)															

● お子さんの耳にきちんと音が届いていますか？ 1日の教育活動が始まる前に、補聴器・人工内耳の作動チェックを行いましょう。

【電池】 電池チェッカーで調べる、サビがないことを確認する /電池の残量は十分か、交換用の予備電池を用意しているか/

【補聴器】 本体をよくみる、ステゾスコープで音を確認する /音の歪み・ガリ音、ひび割れ・破損、ボリューム・スイッチの動作不良、フックのゆるみ・汚れ、Tコイル、FMなどの外部入力、汗カバー/

【イヤモールド】 細部をよくみる、ハウリングがないことを確認する /汚れ、耳垢のつまり、ひび割れ、結露、古くないか、ゆるくないか、音孔の太さは十分か、痛み・材質によるアレルギーはないか/

【人工内耳】 本体をよくみる、コイルチェッカーの点灯、表示を確認する、マイク・外部入力の音をモニターで確認する /亀裂、ボリューム・スイッチの動作不良、ケーブルの傷み、接続部のサビ・汚れ、汗カバー/

【耳】 顕耳鏡でみる /耳垢がないか、耳介・外耳道に湿疹、かぶれ、炎症などはないか、鼓膜の状態はどうか、風邪・鼻水・中耳炎はないか/

【きこえ】 簡易なチェック法として、名前よびの他、リングの6音 /a:/ /u:/ /i:/ /j:/ /s:/ /m:/ の復唱なども利用できます。